

# SurgiSeal<sup>®</sup>

## TOPICAL SKIN ADHESIVE

### 2-Octyl Cyanoacrylate

細かい、狭小部の塗布に




### SurgiSeal Stylus<sup>™</sup>

TOPICAL SKIN ADHESIVE  
2-Octyl Cyanoacrylate

サージシール スタイルス  
製品番号 AZSS 050S

幅広い塗布に

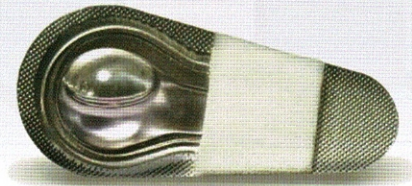

### SurgiSeal<sup>®</sup>


TOPICAL SKIN ADHESIVE  
2-Octyl Cyanoacrylate

サージシール ティアドロップ  
製品番号 AZSS 035T

用量	0.5ml
カバーする創の長さ	約22cm

用量	0.35ml
カバーする創の長さ	約17cm

\*届出番号 13B1X00180000017  
\*EOG滅菌済

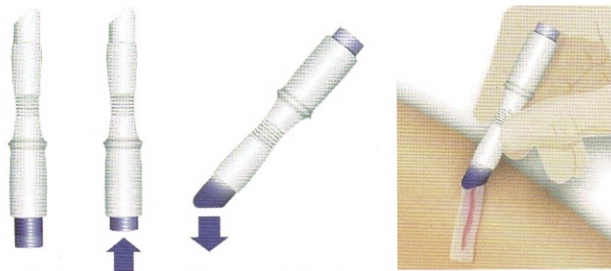


先端を上向きにして、底のボタンを上方向へ押す。

容器を逆さにして、接着剤が先端に流れるようする。

患部を寄せて、2層に塗る。1層目と2層目の間は30秒間をおく

\*届出番号 13B1X00180000016  
\*EOG滅菌済

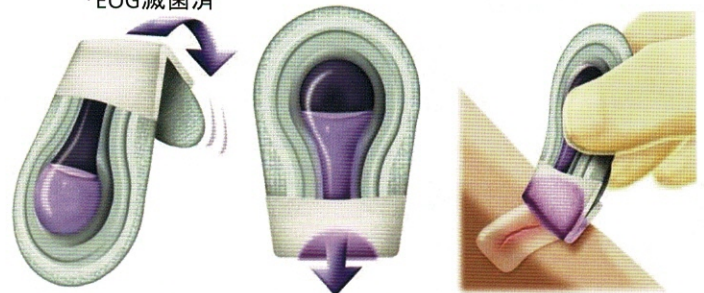

スポンジ部分を上に向け、ミシン目に沿ってカチッと音がするまで折り曲げる。

スポンジ部分を下に向けると、スポンジに接着剤が染み出す。

患部を寄せて、2層に塗る。1層目と2層目の間は30秒間をおく。

POSITIONING  
STATEMENT

# SurgiSeal<sup>®</sup>

TOPICAL SKIN ADHESIVE  
2-Octyl Cyanoacrylate

一般医療機器 皮膚用接着剤  
包装: 12個/箱

局所皮膚用接着剤「サージシール」は強度と柔軟性との最適なバランスを有する。切開創や傷口の修復のための5-0以下の糸での縫合の代わりに使用でき、抜糸が不要となる。また皮膚上にフィルムを形成することにより、傷の修復の時間短縮ができ、防水性を有し、細菌の侵入を防ぐ。



# SurgiSeal<sup>®</sup>


TOPICAL SKIN ADHESIVE

2-Octyl Cyanoacrylate

## サージシールの利点

高純度の2-オクチルシアノアクリレート

- 純度99%の2オクチルシアノアクリレートを使用
- 創閉力が強い
- 柔軟性の向上によりひび割れが少ない
- 細菌性防御効果

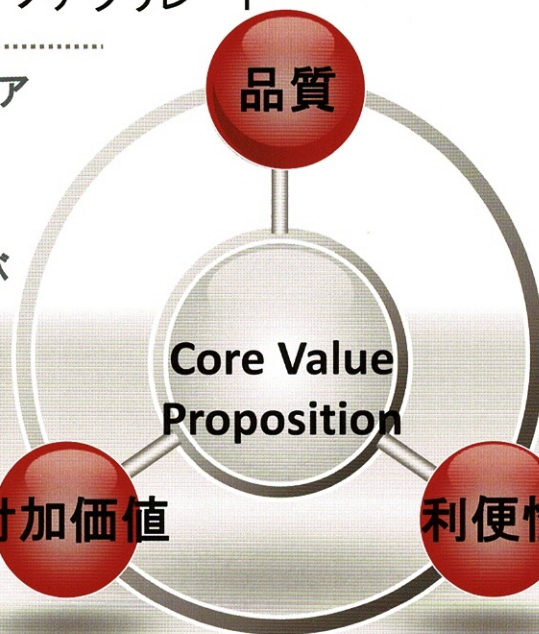


- 均一に塗布が可能
- 目詰まりがなく長時間使用可能
- 作業効率の向上
- 安全性の高いアプリケーションター

患者様への付加価値


- 低発熱性・低刺激性
- 高い水蒸気透過率

高性能なアプリケーションター

## 皮膚用接着剤の利点

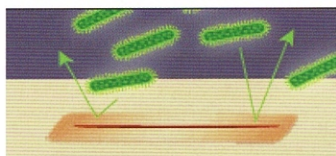

剥がれや脱落がない為創傷への細菌の侵入を防ぎ、感染が発生する可能性を低減する。保護バリアが形成される。

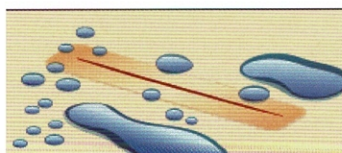

塗布直後から防水性が発揮される為、患者様は当日からシャワーが可能。



縫合によるステッチマークがなく、また抜糸が必要ないため患者様(特に小児の患者様)のQOLが高められます。

製造販売元 日陽工業株式会社

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-4-16

TEL 03-3718-6211 FAX 03-3718-9506

製造元  Adhezion  
BIOMEDICAL<sup>®</sup>